



SCタブレットMini

タッチで使える携帯用会話補助装置 iPadベース

SCタブレットMiniは、音声出力型コミュニケーション支援デバイス (VOCA) です。すぐに使える会話や単語を1万語以上とりそろえ生活場面やユーザーのニーズに合わせて使用できます。

大きな特徴

①日常生活ですぐに使える!

すぐにしゃべれる単語や会話文を予め備えており、押すだけで会話を読み上げ、今すぐコミュニケーションをはじめられます。

②個々の特性に合わせた会話ページ

知的障害、肢体不自由、発達障害、言語障害など個々のユーザーのニーズは異なります。言語発達段階や言語障害の特性、入力手段に合わせて、入力画面が構成できます。(ホーム画面作成サポート付き)

③どんどん言葉や会話文を増やせる

ことばの発達や学校での学習、生活場面の広がりの中で覚えた言葉やよく使う単語をどんどん追加できます。

SCタブレットMiniは、シンボル、ひらがな、漢字、写真が使えて、タッチで入力できます。

ハードウェアの特徴

とっても丈夫、3年保証

角を丸めたデザインで落下にも耐えられる丈夫なシリコンケースで保護されています。落としても安心です。3年保証で、送料のみで何回でも修理はもちろん、バッテリー交換も可能です。



パワフルなスピーカー

大音量出力が可能な高性能スピーカーです。またスピーカーは相手に向かって取り付けられているので、車の中や屋外、教室でも相手に「あなた」の声がしっかり届きます。



ポータブル

カバンとストラップ付でいつでも持ち運べて、どこへでも連れていけます。SCタブレットには持ちやすいハンドルと安定したキックスタンドが組み込まれています。



自分のことはですぐに話せる!

脳性まひや発達障害、様々な理由で発声・発話が困難な子どもさんや成人の方にとって、文字を入力してすぐに読み上げられる事は、自分の意思を伝えるうえでとても大事な事です。SCタブレットMiniには、50音とローマ字キーボードが備わっており、文字を入力してすぐに読上げられます。

また日常生活では、人との関わりの中で、タイミングよく受け答えが出来る事がさらに大切な場合があります。SCタブレットMiniには言いたい言葉が予め場面ごとに用意されているので、ボタンをタッチするだけですぐに会話に参加できます。

言いたい事を伝えられている安心感で、落ち着いて日常生活を送ることが出来る場合もあります。




SCタブレットMini用TDスナップ ホーム画面作成サポートサービス

SCタブレットMiniにはホーム画面作成サポートサービスが付いて来ます。ユーザーのニーズに合わせた、表示ボタン数や、シンボルや写真、ひらがなや漢字の使用など、すぐに使い始められるホームページを設定の上お渡しします。

子ども/大人用サンプルページと簡単編集機能

学校、児童発達支援・放課後等デイサービス、あるいは家庭での学習に便利な授業のやりとりのための会話画面もサンプルページで簡単に作れます。「あそびたい」気持ちや「教えてください」の要求も伝えられます。

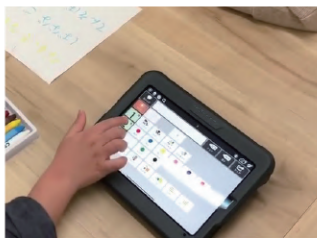

キーボードと読上げ

SCタブレットMiniには50音のキーボードも、ローマ字キーボードも用意されています。そして書いた文をすぐに読上げることができます。



技術仕様

項目	内容
サイズ・重量	215 x 170 x 50mm 850g
オペレーションシステム	iPadOS
ボタン	電源、音量調節、入力モード選択
コネクタ	USB-C
防水と固形物体への保護	IP22
付属品	充電器 充電ケーブル ショルダーストラップ 専用バッグ

項目	内容
スピーカー	5W 埋め込みスピーカー x 2
WLAN	802.11ax Wi-Fi 6
Bluetooth	Bluetooth 3.0
チップ	AppleA15 Bionic
ハードディスクドライブ	64GB
バッテリー作動時間	最長10時間
バッテリー充電時間	最長4時間
落下防止	1.5m
動作温度	0-35度
電源	100-240 VAC

<オプション>VESA用マウントプレート、キーガード、キーガードホルダー、車イス用アーム等