


コミュニケーター5 コンパニオン・ライセンス(Companion License Communicator5)

インディ with コミュニケーター5 に付属しているコミュニケーター5 ソフトウェアについては、最高3つの追加のコンピュータにインストールして使用できます。例えばユーザーの家族や先生のパソコンなどです。コミュニケーター5 をインディ以外のパソコンで使用するには、コンパニオン・ライセンス(Companion License for Communicator5) を取得し、使用するパソコンのコミュニケーター5 で Companion License を入力する必要があります。このコンパニオン・ライセンスを取得するには、下記の手順に従ってください。


1. インディ上でコミュニケーター5 が起動している事を確認してください。
2. インディがインターネットに繋がっていることを確認してください。
インディの画面上で右クリックしてください。(詳しくはコミュニケーター5 スタートマニュアルの P22 を参照)
3. 介護者用メニューで「詳細設定」を選びます。
4. 「システム」のタブを選びます。
5. 「ライセンスマネージャー」を選びます。
6. 「コンパニオンライセンス」を選びます。
7. myTobiiDynavox のウェブページが起動しますので、Register ボタンを選びアカウントを作成してください。
8. アカウントを既にお持ちの場合はユーザーネームまたは e-メールアドレスとパスワードでログインし、Sign In を選択して下さい。
9. その後自動的に目的のページが表示されます。
10. インディ コミュニケーターのプロダクトキーが管理システムに入力されます。




介護者用メニュー

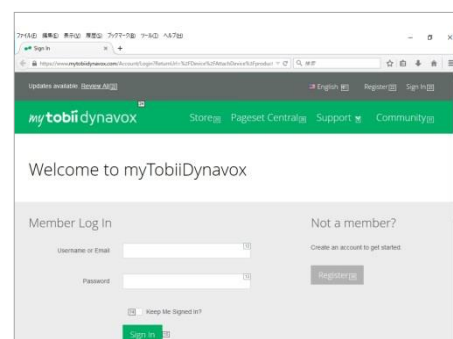


myTobiiDynavox ページ

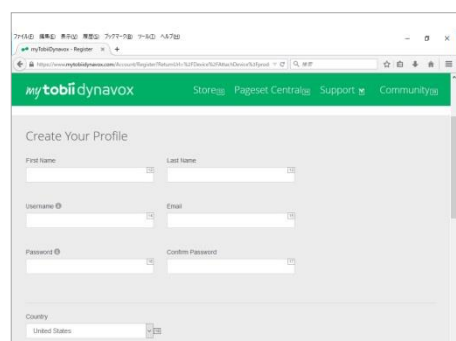

アカウント作成ページ

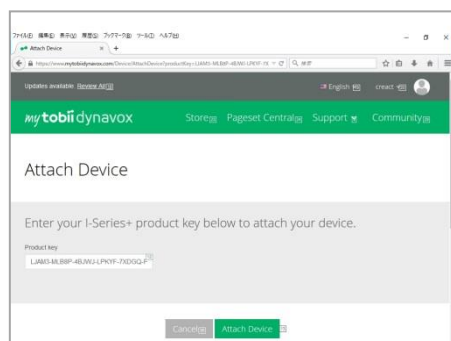


Attach Device ページ

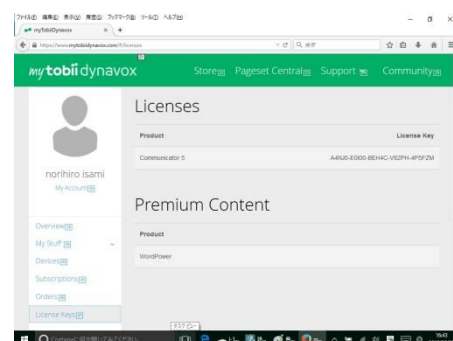

License Key のページ

11. Attach Devices ボタンを選択しあなたのインディを管理システムに登録します。
12. 自動的に Account Status ページが表示されます。
13. Communicator5 と書いてある場所に、Companion License Key が表示されますのでメモしてください。
14. コミュニケーター5 ソフトウェアは追加するコンピュータをインターネットに接続し、下記のリンクから Communicator5.x.x Suite Japanese をダウンロードして、インストールしてください。

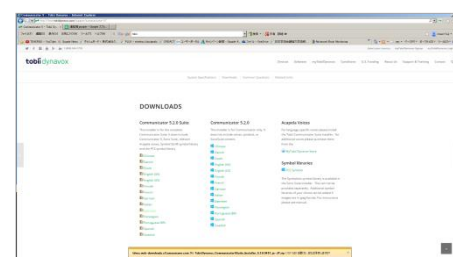

ダウンロードのページ

<http://www.tobiidynavox.com/support/communicator-5/>