

重度障害者用意思伝達装置

TC スキャン

トビー & クレアクト with スキャン



補装具適用実績あり

TC スキャンって…？

- ✓ **最初から一貫した仕様で長期的に使用可能** … 身体状況に合わせてスイッチから視線入力まで、多種多様な機器に対応します。
- ✓ **操作回数を少なくして効率的に入力** … 電源 ON ですぐに文字盤が起動することで操作回数を減らします。
- ✓ **一人ひとりに合わせた画面作成** … 個々のユーザーの使いやすい画面に編集することで、ストレス無く使用できます。
- ✓ **フリーズが少なく動作が安定** … コンピュータのスペックも高く、動作の安定性が見込めます。
- ✓ **支援者が扱いやすい** … パソコン知識がなくても容易に使用、編集が可能です。



- * 操作方法は、画面上を自動で動くスキャン枠が目的の所へ来た時にほんの少し身体を動かすだけです。文字入力による会話・文章作成・メール・インターネット・環境制御など、意思疎通から、パソコン操作までワンスイッチで様々なことができます。
- * 男性 / 女性の声から選択でき、自然な文章読上げができます。
- * 約 15,000 種類のシンボル内蔵、見やすい画面が作成可能。
- * より直感的な操作の為に、不要な機能は非表示にできます。
- * 電源 ON で即、文字入力画面が起動します

途切れることのないコミュニケーション



TC スキャンは「スイッチから視線入力まで」様々な入力インターフェースに対応しています。これまで身体状況の変化によって変更せざるを得なかった意思伝達装置を、もう買い替える必要はありません。また初めから新しい機器の使い方を覚える必要がなく、同じ装置で最初から長期間使用でき途切れることのない、コミュニケーションが可能になります。



メール：

内蔵の簡易なメーラーを使えば、メールを使ったことの無いユーザーもすぐにメール操作が可能です。
今までは目の前の人との会話だけだったユーザーも、遠くにいる人と簡単にコミュニケーションが出来るようになります。



Windows の操作：

下記の3方法で操作が可能です。

- ・レーダータイプ：時計回りにスキャンが開始します
- ・スキャンタイプ：上からスキャンが開始します
- ・保持移動タイプ：スイッチ保持中、カーソルが移動します



オプション：

視線入力装置 (PCEye 5) の追加で視線での入力も可能です。
視線とスイッチは併用する事ができます。
視線でマウスカーソルを動かし、決定はスイッチを押すことで、『より楽に、より早い入力』を可能にします。

TCスキャン は、視線入力にも便利な入力用ソフトウェアを採用しており、またパソコンの知識が乏しいユーザーでも使い易いインターネットやメール用の画面も備えています。

TCスキャンの機能と特徴	説明	価格 480,600 円 (非課税)
パソコン知識	乏しくても使えます	
文字の大きさ調整	自由に調整できます	
1スイッチスキャン	可能です。2スイッチにも対応しています	
ブロックスキャン	可能です。自由に設定できます。	
スキャングループ設定	自由に設定することができます	
定型句入力	有ります。また自由に編集できます	
ネット専用ページ	有ります。また使い易いように自由に編集できます	
Windows 操作	制限無しで操作が可能です	
マウス指定位置移動	制限無しで位置移動ができます	
簡易メール	有ります。また使い易いように自由に編集できます	
一般メーラー使用	可能です	
画面 (ページ) の追加	自由に編集作成し追加できます	
画面順序変更	自由に調整できます	
キー割り当て編集	キーにショートカットなどを設定可能です	
視線入力装置の追加	追加でき、同じ画面や視線入力専用の画面を使用できます	

総輸入販売元

株式会社 クレアクト Tobii 福祉機器事業部

〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-8-13 五反田増島ビル 4 階

Tel : 03-3442-5401 Fax : 03-3442-5402 eMail : info@creact.co.jp


www.creact.co.jp