

Coe font の TC スキャン導入方法

1.coe font サイトのマイページに入り、

” あなたの AI 音声”から、登録した自分の AI 音声を選択。



2.登録したご自身の合成 AI 音声をクリック



2.自分の声のページを開くと、URL 表示が以下画像のように表示されます。
coefonts/以降が、**コエフォントユーザーID** となります。こちらをコピーします。



3.コピーしたコエフォントユーザーID を TC スキャンの詳細設定から
コエフォントユーザーID 枠にペースト(貼り付け)し、保存ボタンをクリックし、完了。

