


# Joy スイッチ 取扱説明書

## 1. 概要

USBスイッチ変換器「Joy スイッチ」は、スイッチ入力端子のないパソコンをUSBポートを使用して、外部スイッチをパソコンの入力装置として使用できます。トビー視線入力装置と組み合わせてスイッチをマウスの左クリック、右クリックとして機能させたり、トビー・コミュニケーターソフトのスキャンモードでは決定、リバーズをスイッチで行う事が出来ます。電源はUSBポートから供給されます。

## 2. 接続図

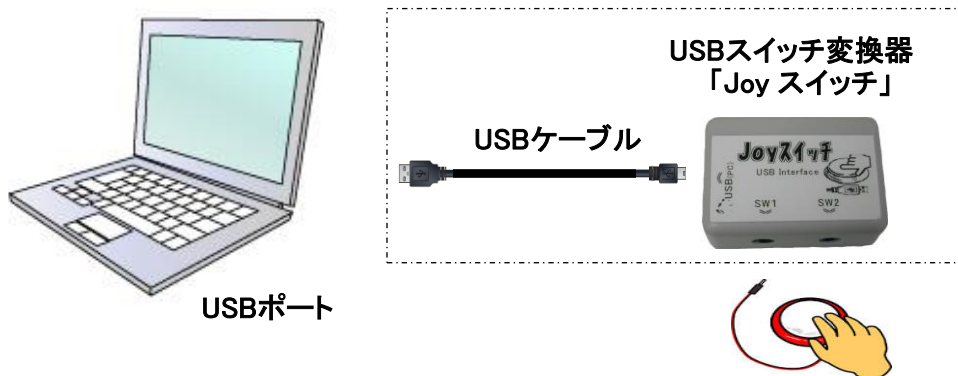

## 3. 設定及び使用方法

- 1) USBスイッチ変換器「Joy スイッチ」にUSBケーブルを接続し、パソコンに接続します。自動的にデバイスドライバーがインストールされます。スイッチを接続し、ご使用下さい。


※トビー視線入力装置の『Mouse Emulation』で使用する場合、SW1が左クリック、SW2が右クリックとなります。トビー・コミュニケーターソフトのスキャンモードではSW1が決定、SW2がリバーズとなります。

## 4. トビー視線入力装置で使用する場合の設定


視線入力装置の入力方法の設定を行ないます。「Gaze Interaction Settings」をダブルクリックし、起動させます。

a)

「インタラクション」を選択し、「有効化の方法」の欄で「スイッチ」を選択します。「適用」をクリックします。

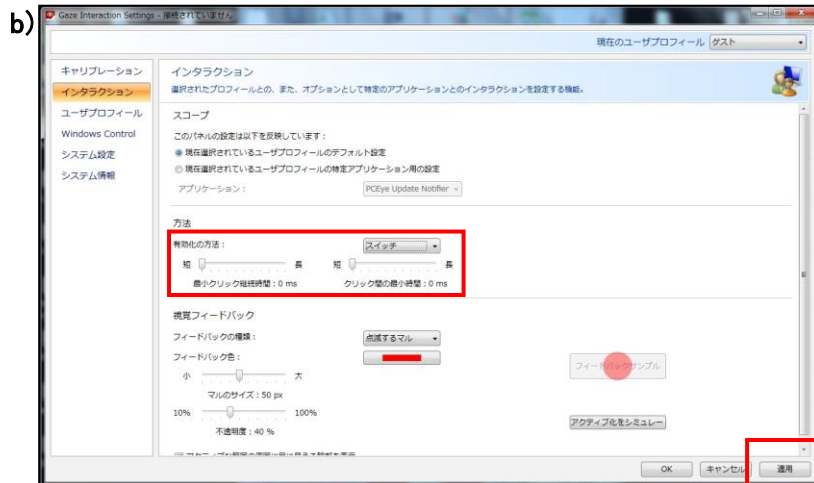

必要に応じてスイッチの「最小クリック継続時間」、「クリック間の最小時間」を設定します。「適用」をクリックします。

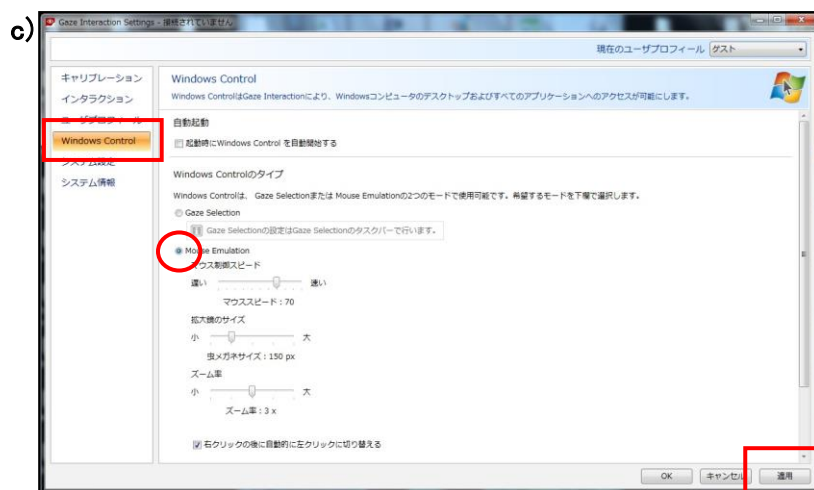


「Windows Control」を選択し「Mouse Emulation」にチェックを入れます。「適用」をクリックします。

キャリブレーション及び全ての設定が終了したら「OK」をクリックして終了です。


## 5. トビー・コミュニケーターをスキャンで使用する場合の設定


**注:** Joyスイッチを接続してから、トビー・コミュニケーターソフトを起動してください。  
 (ソフト起動後に接続するとソフトがスイッチを認識しません)  
 SW1: スキャン開始及び決定、SW2: リバース(逆方向にスキャンします)


a) トビー・コミュニケーターを起動して、設定をクリックします。

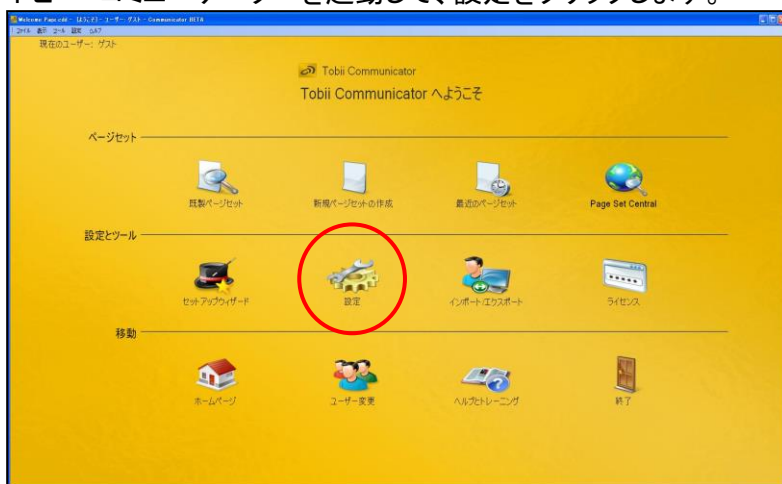

ホームページなどから左図のスタートページに移動する場合は、右クリックし、「指定したページセットの実行」→「スタートページ」を選択します。


b)  「入力」タグの「入力方法」をクリックします。

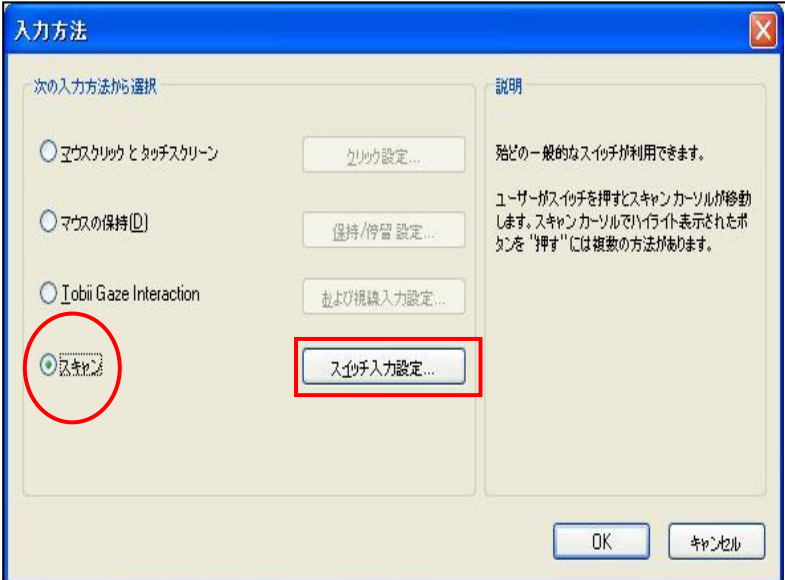c)  「入力方法」の「スキャン」にチェックを入れて、「スイッチ入力設定」をクリックします。

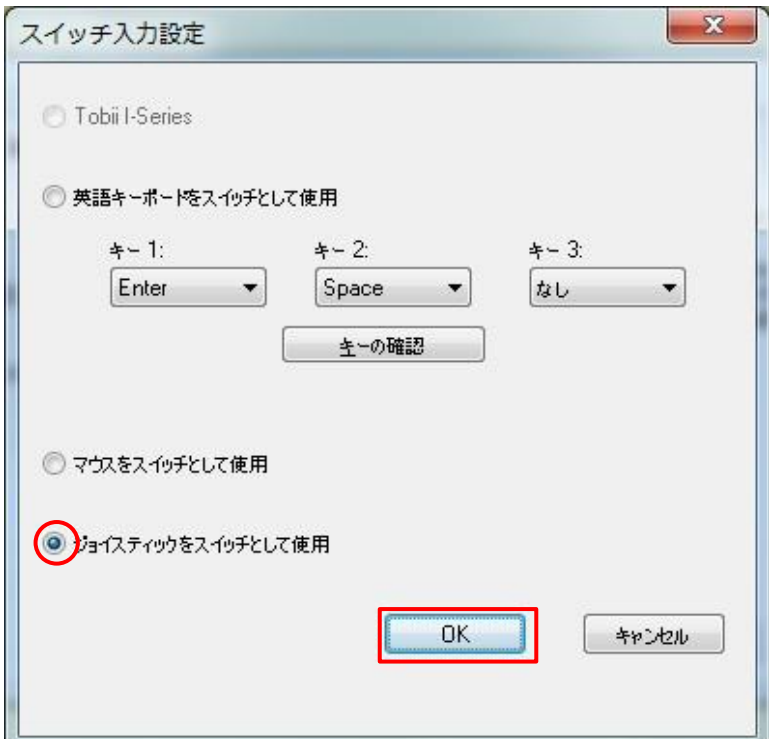d)  「ジョイスティックをスイッチとして使用」にチェックを入れます。  
「OK」をクリックします。



「入力」タグの「スキャン設定」をクリックします。

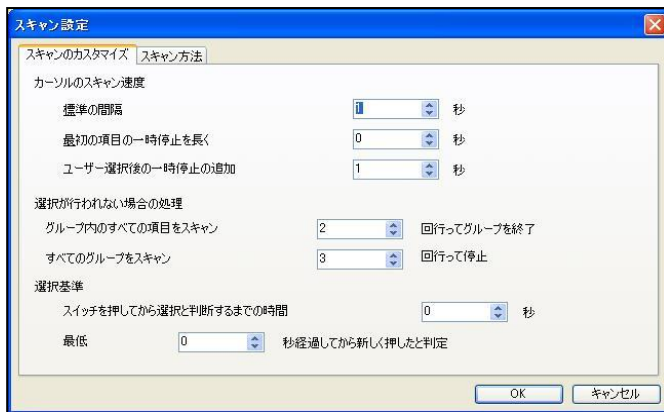

「スキャン設定」で個人に合わせて、スキャンのカスタマイズを必要に応じて行います。

ご不明な点などございましたら、下記のサポートまでお問合せ下さい。

総輸入販売元: 株式会社 クレアクト Tobiiアシスティブ事業部  
 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-8-13 五反田増島ビル4階  
 TEL: 03-3442-5401 FAX: 03-3442-5402 メール: info@creact.co.jp Web: www.creact.co.jp