

tobii dynavox

コンピュータアクセス用 視線入力ツール トビー PCEye Mini

NEW!
tobii 史上
**最小
最軽量**

tobii

※実物大(170 × 18 mm)

これまでパソコン入力が困難だった方々へ。
お手持ちのノートパソコンに USB で接続できる
視線入力ツール **トビー PCEye Mini**
(ピーシーアイ ミニ)
の登場です！

脳性まひや筋ジストロフィー、ALS がある方々へ

マウス操作やキーボード入力が苦勞している PC ユーザーに嬉しいお知らせです。「マイトビー」や「えくすぶろあ」でおなじみの tobii 社から最も小型で、より多くの方々の視線入力に適したアイトラッカー、トビー PCEye Mini アイトラッカーが新登場!! 学習や仕事を続ける、文字入力を早める、SNS を快適に、ゲームを楽しむ、様々な使い方が出来ます。

目で見るだけでマウス操作や文字入力

トビー PCEye Mini は、ノートパソコンに USB2 または USB3 で接続するだけですぐに視線によるパソコン操作が可能になります。キャリブレーションという簡単な準備を行った後は、ユーザーが画面のクリックしたい場所や書きたい文字のキーをただ見るだけ、視線がマウスの操作の代わりをして、文字入力やゲームの操作が出来ます。

マウスコントロール用ソフト付き

トビー PCEye Mini には、視線でマウス操作やキー入力可能な WindowsControl ソフトウェアが付いてきます。このソフトウェアでクリック、ダブルクリック、ドラッグなどのマウス操作はもちろん、Windows 用のオンスクリーン・キーボードの視線による入力ができるので、ほとんどのパソコン操作が可能になるのです。

首や肩の痛み悩まされていた方々へ

現在は他の入力方法でパソコン操作をしているユーザーも、このトビー PCEye Mini と組み合わせると操作が早く楽に行えます。これまで首や肩の痛み、操作スピードの遅さに悩まされていたパソコンユーザーもトビー PCEye Mini と組み合わせる事によって、より自然にリラックスしてより速くパソコン操作ができるようになります。



トビー PCEye Mini をセットしたノートパソコン

tobii dynavox トビー PCEye Mini (ピーシーアイ ミニ) 技術仕様

視線データ サンプリングレート	60 Hz
接続インターフェース	USB 2.0
アイトラッカーからの距離	45 ~ 85 cm
頭部動作可能範囲 (アイトラッカーからの距離が 55cm の時)	35 × 30 cm 楕円
スクリーンサイズ	19 インチまでが推奨
アイトラッカーのサイズ (幅 × 高さ × 厚さ)	170 × 18 × 13 mm
アイトラッカーの重量	59 g
使用するコンピュータの要求スペック	USB 2.0 以上 OS : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 CPU : 1 GHz, 2 コア以上 メモリ : 2 GB RAM グラフィックス : 60 MB VRAM 450 MB 以上の空き容量

トビー・コミュニケーターと組み合わせる

トビー・コミュニケーター・ソフトウェアとは

トビー PCEye Mini は付属の WindowsControl ソフトウェアでほとんどのパソコン操作が可能になっています。しかし視力のあまりよくない方、頭部や上体の揺れがある方、目が疲れやすい方はトビー・コミュニケーター・ソフトウェアを使うとより楽に、簡単に視線入力ができます。入力キーの大きさを変えればキーの枠の範囲内の視線を拾ってくれるので、細かいターゲットをじっと凝視することなく非常に楽に入力できます。

様々な種類のキーボードと操作画面

メールや SNS、インターネット用など様々な種類の操作画面やキーボードが付属しているので、自分に合った画面を選びいつでも呼び出して使う事ができます。

画面の作成や編集が可能

画面の作成や編集ができるので、ユーザーの必要に応じた大きさや色に変更、写真や画像の使用ができるだけでなく、環境制御装置や呼び出しコールを操作する画面も作成できます。日常よく使う会話は一つのボタンにしておけば、ただ見るだけで簡単な会話も可能です。

会話や文章の読上げ


読上げ音声が付属しているので、会話や文章を読み上げる事ができます。

視線とスイッチを組み合わせ可能

トビー・コミュニケーターを使えば、スイッチと視線を組み合わせるより速く、より楽に入力する事も可能です。例えばキーを見るのを視線で、入力の決定をスイッチで行えば目の疲れも軽減できます。

トビー PCEye Mini で使えるその他のツール (一部コミュニケーターが必要)

- トビー視線ビューワ : 画面上のどこを、どのように見ていたか可視化するソフトウェア
 - センサリーアイ FX : 見る力の評価、視線入力や認知の基礎を学べるソフトウェア
 - Look to Learn : 楽しいゲームで見る練習ができるソフトウェア
 - アイコール (呼び出し用ツール)、USB スイッチ変換機、ジョイスティック
- その他 Surface4 とのセットやお得なパッケージがあります。お問い合わせ下さい。

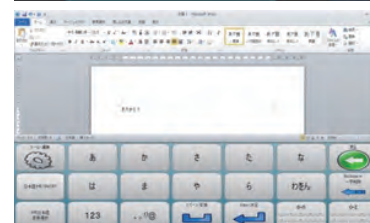

総輸入販売元

株式会社 クレアクト Tobii アシスティブ事業部

〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-8-13 五反田増島ビル 4 階

Tel : 03-3442-5401 Fax : 03-3442-5402 eMail : info@creact.co.jp

Creact

www.creact.co.jp